

紙製

# フェイスシールド カオマモール

咳やくシャミの飛散を防止! 顔面への飛沫を完全ブロック!!

## 商品特長


- 大きな窓で広い視野を確保
- メガネや帽子を着用しても装着可能
- 折るだけで簡単に組み立て完了
- 紙製で安価・大量生産が可能
- 使い捨てできて衛生的
- リサイクル紙を使用し環境に配慮
- 表面はPP加工でアルコール消毒も可能
- 頭の大きさに合わせてやさしくフィット
- 印刷によるオリジナルデザインが可能



## 製品の仕様

素材: 紙・PPフィルム / 展開全寸: 幅780mm × 高さ334mm / 前面窓部分: 幅220mm × 高さ130mm  
使用可能サイズ: 約520mm～710mm ※着帽でも使用できるよう710mmまで対応可能

## ■ オリジナルデザインの例 ■

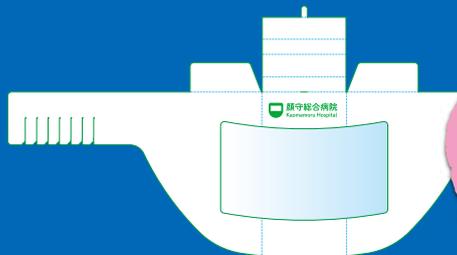


企業・病院の  
ロゴマーク等を  
入れてPRに!




お子さま向けに  
イラストを入れて  
親しみやすく!

とっても  
簡単!!


【カオマモール】  
組み立て方

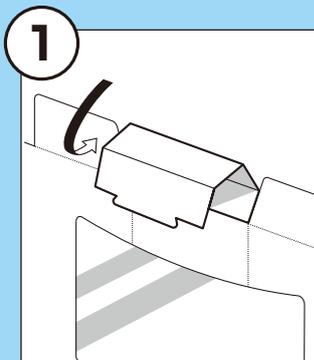


- 1 ● 上部に突き出た部分を内側に折り込む。

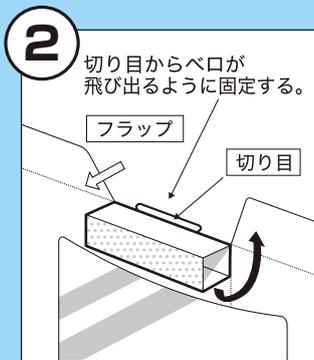

- 2 ● ベロを切り目に差し込み、アテを作る。  
● 両端のフラップも内側に折り込む。

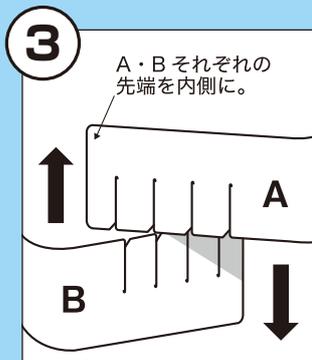

- 3 ● ベルト部分を丸めてA・Bの先端が内側になるよう上下に挟み込み、サイズを調整します。

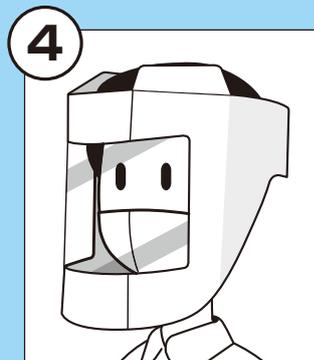

- 4 ● 頭部に装着して完成。ずれなどが気になる場合は、テープやピンで留めてご使用ください。